

INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW Z POLICZKA

Centrum Badań DNA oferuje specjalnie zaprojektowany „ZESTAW DO WYMAZÓW Z POLICZKA”, który jest przeznaczony do pobierania, a następnie bezpiecznego transportowania wymazów z wewnętrznej części policzka, do badań genetycznych. Pobrania wymazu należy dokonywać **wyłącznie za pomocą materiałów dostarczonych przez Centrum.**

Skład zestawu do pobierania wymazów:

- Sterylna pałeczka w probówce do wymazów - 1 szt.
- Rękawiczki lateksowe – 2 szt.
- Instrukcja pobierania wymazu – 1 szt
- Formularz zlecenia badań genetycznych w Centrum – 1 szt.
- Koperta do zabezpieczania wymazów „Wipak Medical” – 1 szt.
- Koperta foliowa (tzw. Bezpieczna Koperta) – 1 szt.
- Wkład wysuszający – 1 szt.
- Druk przelewu za badanie – 1 szt.
- Koperta zwrotna zaadresowana na Centrum (przesyłka kurierska).



I. Przygotowanie pacjenta:

- Co najmniej na **1 godzinę** przed pobraniem wymazu nie należy spożywać posiłków, płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani myć zębów.
- Przed pobraniem w jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych, np. gum do żucia, lizaków, cukierków itp. W przypadku dzieci dopuszczalny jest smoczek (tzw. smoczek z kółeczkiem) pod warunkiem używania go wyłącznie przez jedno dziecko (nie np. przez matkę i dziecko lub więcej niż jedno dziecko).

II. Czynności w trakcie pobierania wymazu:

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach lateksowych.

1. Opisać wymazówkę i kopertę „Wipak Medical” imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania wymazu




2. Otworzyć opakowanie i wyjąć wymazówkę z probówki ochronnej.



Uwaga! Koniec wymazówki nie może dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby poza osobą, od której pobierany jest wymaz.

3. Wymaz pobrać poprzez płynne pocieranie końcem wymazówki obu stron wewnętrznej części policzka.

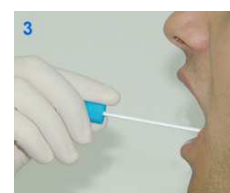

Uwaga! U dzieci nabłonek jamy ustnej złuszcza się w dużo większym stopniu (dostosowanie siły i czasu pocierania).

4. Po pobraniu wymazu należy niezwłocznie umieścić wymazówkę w opisanej probówce ochronnej



5. Zabezpieczoną wymazówkę należy następnie umieścić w opisanej kopercie „Wipac Medical”.



6. Umieścić kopertę „Wipac Medical” z pobranym uprzednio wymazem w **Kopercie Bezpiecznej**.



7. Umieścić w kopercie bezpiecznej wkład wysuszający



8. Opisać Kopertę Bezpieczną czytelnie wypełniając poszczególne pola (nadawca, odbiorca, data nadania i podpis nadawcy), a następnie oderwać jeden odcinek kontrolny koperty i zachować go.



9. Wypełnić „**FORMULARZ ZLECENIA BADAŃ**”:

- podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia,
- wybrać zlecane badania genetyczne zaznaczając czytelnie odpowiednie pola (prosimy zapoznać się z załączonym do Zestawu cennikiem).
- **uwaga: podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań**

10. Dokonać opłaty za zlecane badania zgodnie z cennikiem. Opłaty można dokonać w dowolnym Urzędzie Pocztowym lub oddziale banku. Honorujemy również wydruki potwierdzenia przelewu wykonanego przez kanał internetowy przesłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

11. Opisaną Kopertę Bezpieczną, zawierającą odpowiednio zabezpieczoną i opisaną wymazówkę oraz wypełniony Formularz zlecenia badań genetycznych wraz z kopią potwierdzenia wpłaty umieścić w zaadresowanej zwrotnie kopercie zbiorczej.

III. Wysyłka próbek do badania:

Pobrano materiał należy wysłać pocztą kurierską **TNT** na koszt odbiorcy na adres:

NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej, Centrum Badań DNA, ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań

W tym celu należy telefonicznie zgłosić odbiór przesyłki kurierskiej w **wersji Express** bezpośrednio do działu przesyłek medycznych pod numerem telefonu 022 771 71 70 oraz uzgodnić czas i miejsce odbioru przesyłki przez kuriera. Podczas zgłoszenia telefonicznego należy powołać się na **numer klienta Centrum: 111864**, co jest warunkiem dostarczenia przesyłki na koszt odbiorcy.

UWAGA!

Prosimy o nadawanie przesyłek kurierskich WYŁĄCZNIE w wersji TNT EXPRESS. Centrum nie pokrywa kosztów innych typów przesyłek (np. TNT 12:00 Express, TNT 10:00 Express, TNT 9:00 Express), w takich przypadkach koszt ponosi NADAWCA.

Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do czwartku.