

INSTRUKCJA POBIERANIA PŁYNU MÓZGOWO - RDZENIOWEGO I POZOSTAŁYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH DO BADAŃ GENETYCZNYCH

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

W skład zestawu wysyłkowego wchodzi:

- Ochronne pudełko styropianowe – 1 szt.
- Wkład chłodzący – 3 szt.
- Koperta zwrotna – 1 szt.
- Instrukcja pobierania materiału – 1 szt.
- Formularz zlecenia badań – 1 szt.

I. Czynności przed pobraniem materiału:

Dołączone do zestawu wkłady chłodzące należy umieścić w zamrażarce, na **co najmniej 6 godzin** przed pobraniem materiału w celu całkowitego ich zamrożenia - umożliwi to utrzymanie właściwej temperatury próbki w czasie transportu.

II. Pobranie materiału:

1. Płyn mózgowo - rdzeniowy oraz inne płyny ustrojowe (np.: płyn stawowy, płyn owodniowy) mogą być pobrane wyłącznie przez lekarza w jednostkach leczenia zamkniętego.
2. Należy unikać zanieczyszczenia próbek **płynów ustrojowych krwią**.

UWAGA! Nie należy otwierać próbowki ani przelewać pobranego materiału.

3. Sterylną próbkę zawierającą materiał do badań należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania. Próbkę należy transportować zawsze w pudełku ochronnym, zawierającym zmrożone wkłady chłodzące, lub w innym pojemniku gwarantującym utrzymanie temperatury wewnętrznej 2-8°C.

UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu 4 dni w temperaturze 2-8°C.

W przypadku płynu mózgowo-rdzeniowego na infekcje ogólnoustrojowe, próbkę należy dostarczyć maksymalnie w ciągu 24 godzin od pobrania w temperaturze 2-8°C.

W przypadku, jeżeli nie jest możliwe dostarczenie płynu mózgowo-rdzeniowego w ciągu 24 godzin od pobrania, materiał należy zamrozić w temperaturze -20°C i dostarczyć do laboratorium w stanie zamrożonym.

Uwaga! W przypadku innych badań, płynów ustrojowych nie wolno zamrażać. Zamrożenie uniemożliwia uzyskanie prawidłowych wyników badań.

III. Wypełnić „Formularz zlecenia badań”:

- podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia,
- wybrać zlecane badania zaznaczając czytelnie odpowiednie pola
- uwaga: podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań.**

Pudełko ochronne zawierające próbkę do badań umieścić w kopercie z wkładem pęcherzykowym wraz z wypełnionym formularzem zlecenia (opatrzonym podpisem osoby poddanej badaniu).

**W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta Alior Bank:
69 2490 0005 0000 4520 1414 0407**

Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do czwartku.