

INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW Z DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

Skład zestawu wysyłkowego:

- Sterylna pałeczka do wymazów w probówce – 1 szt.
- Rękawiczki lateksowe – 2 szt.
- Formularz zlecenia badań – 1 szt.
- Instrukcja pobierania materiału – 1 szt.
- Koperta zwrotna – 1 szt.

I. Czynności przed pobraniem materiału:

- Przed pobraniem materiału należy zachować 7 dni przerwy po leczeniu antybiotykiem, a 5 dni przerwy po leczeniu środkiem miejscowym (np. globulki dopochwowe);
- Przez okres 24 godzin przed pobraniem należy zrezygnować ze współżycia płciowego oraz ograniczyć zabiegi higieniczno - pielęgnacyjne okolicy narządów płciowych;
- U pacjentek wymazu nie należy pobierać w okresie krwawienia miesięczkowego;
- W przypadku pobierania wymazu z cewki moczowej, zaleca się nieoddawanie moczu przez 2 godziny przed pobraniem wymazu. Podczas mikcji komórki nabłonkowe zawierające patogeny zostają wypłukane z cewki moczowej.

II. Czynności w trakcie pobierania wymazu:

UWAGA! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach lateksowych.

II.A. Wymaz z szyjki macicy:

1. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego
2. Oczyszczyć ujście szyjki macicy sterylną gazą usuwając nadmiar śluzu.
3. Wprowadzić wymazówkę na głębokość 1-2 cm do kanału szyjki macicy i kilkakrotnie nią obrócić.
4. Wyjąć wymazówkę nie dotykając ścian pochwy.
5. Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.

UWAGA! Nie należy pobierać wymazu z kanału szyjki macicy u kobiet ciężarnych!

II.B. Wymaz z pochwy:

1. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego
2. Wprowadzić wymazówkę do pochwy i pobrać materiał z jej ścian lub tylnego sklepienia pochwy poprzez kilkakrotne potarcie i obrócenie wymazówki.
3. Wyjąć wymazówkę i przenieść do sterylnej probówki.
4. Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.

IIC. WYMAZ Z PRĄCIA

1. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
2. Wymaz pobrać przez kilkakrotne potarcie ruchem okrężnym rowka założonego (wokół penisa) na całej długości oraz z okolic ujścia cewki moczowej i przenieść do sterylnej probówki.
3. Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania.

IID. WYMAZ Z CEWKI MOCZOWEJ

1. Pobrać około 2 godziny po oddaniu moczu.
2. Wyjąć wymazówkę z opakowania ochronnego.
3. Wprowadzić wymazówkę do cewki moczowej na głębokość ok. 1 cm, przytrzymać nieruchomo przez ok. 5-10 sekund, a następnie kilkakrotnie nią obrócić.
4. Wyjąć wymazówkę i przenieść do sterylnej probówki.
5. Probówkę czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania

UWAGA! Pobrany materiał należy przechowywać w lodówce w temp. 2-8°C.

UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu 24 godzin od pobrania. Podczas transportu, pobrany wymaz nie wymaga chłodzenia.

III. Wypełnić „Formularz zlecenia badań”:

- podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia
- wybrać zlecane badania zaznaczając czytelnie odpowiednie pola
- **uwaga! podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań**

Wymazówkę zamkniętą w sterylnej probówce umieścić w woreczku foliowym. Tak zabezpieczoną wymazówkę, wraz z wypełnionym „Formularzem zlecenia badań” umieścić w kopercie zwrotnej.

**W przypadku braku płatności za badanie prosimy o dokonanie wpłaty na numer konta Alior Bank:
69 2490 0005 0000 4520 1414 0407**

Przesyłki należy nadawać od poniedziałku do środy.