

INSTRUKCJA POBIERANIA WYMAZÓW Z POLICZKA

Centrum Badań DNA oferuje specjalnie zaprojektowany zestaw, który jest przeznaczony do pobierania, a następnie bezpiecznego transportowania wymazów z wewnętrznej części policzka, do badań genetycznych. Pobrania wymazu należy dokonywać **wyłącznie za pomocą materiałów dostarczonych przez Centrum**.

UWAGA! Próbki materiału biologicznego są potencjalnie zakaźne. Należy stosować uniwersalne środki ostrożności. Należy nosić rękawiczki i pozostały sprzęt ochrony osobistej, zabezpieczający przed opryskaniem i ewentualnym wystawieniem na działanie czynników chorobotwórczych.

Skład zestawu do pobierania wymazów:

- Sterylna pałeczka w probówce do wymazów - 2 szt.
- Rękawiczki lateksowe – 2 szt.
- Instrukcja pobierania wymazu – 1 szt
- Formularz zlecenia badań genetycznych – 1 szt.
- Ankieta zachorowania na nowotwory – 1 szt. (opcjonalnie)
- Koperta do zabezpieczania wymazów „Hagmedpack” – 2 szt.
- Koperta zwrotna zaadresowana na Centrum – 1 szt.

I. Przygotowanie pacjenta:

- Co najmniej na **1 godzinę** przed pobraniem wymazu nie należy spożywać posiłków, płynów (z wyjątkiem czystej wody) ani myć zębów.
- Przed pobraniem w jamie ustnej nie powinno być żadnych ciał obcych, np. gum do żucia, lizaków, cukierków itp. W przypadku dzieci dopuszczalny jest smoczek (tzw. smoczek z kółeczkiem) pod warunkiem używania go wyłącznie przez jedno dziecko (nie np. przez matkę i dziecko lub więcej niż jedno dziecko).

II. Czynności w trakcie pobierania wymazu:

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności związane z pobraniem wymazu należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach lateksowych.

1. Opisać wymazówkę i kopertę „Hagmedpack” imieniem i nazwiskiem, datą i godziną pobrania wymazu
2. Otworzyć opakowanie i wyjąć wymazówkę z probówki ochronnej.



Uwaga! Koniec wymazówki nie może dotknąć żadnej przypadkowej powierzchni ani innej osoby poza osobą, od której pobierany jest wymaz.

3. Wymaz pobrać poprzez płynne pocieranie końcem wymazówki wewnętrznej strony obu policzków.



Uwaga! U dzieci nabłonek jamy ustnej złuszcza się w dużo większym stopniu (dostosowanie siły i czasu pocierania).

4. Po pobraniu wymazu należy niezwłocznie umieścić wymazówkę w opisanej probówce ochronnej
5. Zabezpieczoną wymazówkę należy następnie umieścić w opisanej kopercie „Hagmedpack” i zakleić kopertę.
6. Powyższą procedurę powtórzyć z drugą wymazówką. Każdą wymazówkę umieścić w oddzielnej kopercie.
7. Do czasu transportu wymazówki przechowywać lodowce w temp. 2-8°C.
NIE ZAMRAŻAĆ!



UWAGA! Najlepiej niezwłocznie po pobraniu przekazać materiał do laboratorium, maksymalnie w ciągu 5 dni. Podczas transportu, pobrany wymaz nie wymaga chłodzenia.

1. Wypełnić „FORMULARZ ZLECENIA BADAŃ”:
 - podać we właściwych miejscach niezbędne do przyjęcia zlecenia dane osobowe, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe prawnego opiekuna, jeśli osoba badana jest niepełnoletnia,
 - wybrać zlecane badania genetyczne zaznaczając czytelnie odpowiednie pola.
 - **Uwaga! podpis osoby zlecającej (pacjenta) jest niezbędny do przyjęcia zlecenia na wykonanie badań**
2. Opisaną Kopertę „Hagmedpack”, zawierającą odpowiednio zabezpieczoną i opisaną wymazówkę oraz wypełniony Formularz zlecenia badań genetycznych umieścić w zaadresowanej zwrotnie kopercie zbiorczej.